

Algemene informatie

Onderhoud van uw beenprothese

Goed onderhoud van uw prothesekoker, binnenkoker, kousen en/of liner is heel belangrijk. Hiermee voorkomt u nare geurtjes en -nog belangrijker- infecties van de stomp door schimmels of bacteriën. In deze flyer geven we u informatie over onderhoud. Heeft u vragen na het lezen? Stel ze onze instrumentmakers vooral of neem contact met ons op via 030 258 1811.



Advies

Onze instrumentmakers geven u bij aflevering van de prothese natuurlijk adviezen voor gebruik en onderhoud. Op- of in de verpakking van de stompkousen en de liners vindt u ook gebruiks- en onderhoudsadviezen.



Onderhoud van de prothesekoker

Houd de koker heel goed schoon. Het beste is om de koker elke dag schoon te maken met lauwwarm water en eventueel een ph-neutrale zeep. Spoel de koker grondig schoon, zodat alle zeepresten verdwenen zijn. Droog de koker goed af! Maak de koker bij voorkeur 's avonds schoon, zodat hij goed kan drogen. Ook kunt u de koker schoonmaken met alcohol 70%, te koop bij de apotheek of drogist. Vraag altijd even uw instrumentmaker of revalidatiearts om advies en meld huidproblemen direct!



Informatie

De Hoogstraat Orthopedietechniek
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht
030 258 1811
oth@dehoogstraat.nl
www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl

De Hoogstraat
Orthopedietechniek



Onderhoud van stompkousen en liners

Gebruik elke dag schone stompkousen. Was uw stompkousen met de hand of in de wasmachine op maximaal 40 graden Celcius, met een neutraal wasmiddel, zonder wasverzachter. Op de verpakking van de stompkousen vindt u het wasvoorschrift. Liners moeten dagelijks worden schoonmaakt met water en een ph-neutrale zeep. Spoel de liner goed af en laat hem drogen. Kijk altijd even naar de gebruiksaanwijzing in de verpakking of overleg met uw instrumentmaker.